

 HENRY SCHEIN®

HOT / COLD PACK • REUSABLE

INSTRUCTIONS FOR USE

Bolsa de frío / calor • reutilizables

INSTRUCCIONES DE USO

Pack de chaud/froid • réutilisable

MODE D'EMPLOI

HS-Kalt-/Warm-Kompressen • wiederverwendbar

GEBRAUCHSANWEISUNG

Pacchetto caldo / freddo • riutilizzabile

ISTRUZIONI D'USO

900-8294 14x13cm

900-8295 29x12cm

900-8296 26,5x13,3cm • soft-gel

Caution: Whether used hot or cold, please check the temperature before applying against skin.

• Do not overheat • Please read instructions for use

Precaución: si se utiliza calor o frío, por favor, verifique la temperatura antes de aplicar sobre la piel. • No sobrecaliente • Por favor, lea las instrucciones de uso

Attention: Qu'il soit utilisé chaud ou froid, s'il vous plaît vérifier la température avant d'appliquer sur la peau. • Ne pas surchauffer • S'il vous plaît lisez les instructions d'utilisation

Achtung: Egal ob die Kompresse heiß oder kalt verwendet wird, überprüfen Sie bitte die Temperatur vor der Anwendung an der Haut. • Nicht überhitzen • Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Anwendung.

Attenzione: Se usato a caldo oa freddo, controllare la temperatura prima di applicare sulla pelle. • Non surriscaldare • Si prega di leggere le istruzioni per l'uso



Distributed by:

Distribuido por: Vertriebt durch:
Distribué par: Distribuito da:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA



Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.

Rev. 2011/08

www.henryscheinbrand.com

Teplý/studený zábal

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů a pomáhá snižovat otoky.
- Skvělé pro léčbu široké škály poranění měkkých tkání.
- Balení zůstane flexibilní i při nízkých teplotách.
- Balení vydrží déle a je účinnější než standardní ledový nebo horký balíček.
- Opakovaně použitelné balení je ideální pro nepřetržité ošetření doma .

Pro použití za studena :

Před použitím vložte balení do mrazničky po dobu až 2 hodin. Zabalte do hadříku nebo ochranného rukávu před aplikací přímo na kůži. Používejte balení v krátkých intervalech ne delších než 20 minut.

Pro horké použití:

Umístěte balení do mikrovlnné trouby na 20 sekund při 600 W. Prodlužte dobu ohřevu v intervalech 10 sekund, abyste v případě potřeby dosáhli požadované teploty. Časy by měly být sníženy pro mikrovlnné trouby s vyšším výkonem. Zabalte do hadříku nebo ochranného rukávu před aplikací přímo na kůži. Používejte balení v krátkých intervalech ne delších než 20 minut.

Varování:

Nikdy nepokládejte obal přímo na kůži, protože extrémní teploty mohou způsobit popáleniny. Před použitím vždy zabalte obal do hadříku nebo ochranného pouzdra . Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste postiženi oběhovými problémy, vyhledejte před použitím lékařskou pomoc. Přestaňte používat, pokud balení způsobuje jakékoli nepohodlí. Pokud je balení propíchnuto nebo otevřeno a roztok je náhodně spolknut, vypijte velké množství vody. Pokud roztok kon- taktuje oči, důkladně promyjte vodou. Poradte se se svým lékařem, pokud máte nějaké obavy o své zdraví. Před použitím zkontrolujte stáří obalu z hlediska těsnosti. Před použitím vyčistěte. Toto balení obsahuje sodnou sůl karboxymethylcelulózy, glycerolu a vody.

DŮLEŽITÉ: NEOTVÍREJTE ANI NEPROPICHUJTE BALENÍ